


iWALK3.0

# Инструкция по использованию

Онлайн версия (русский)

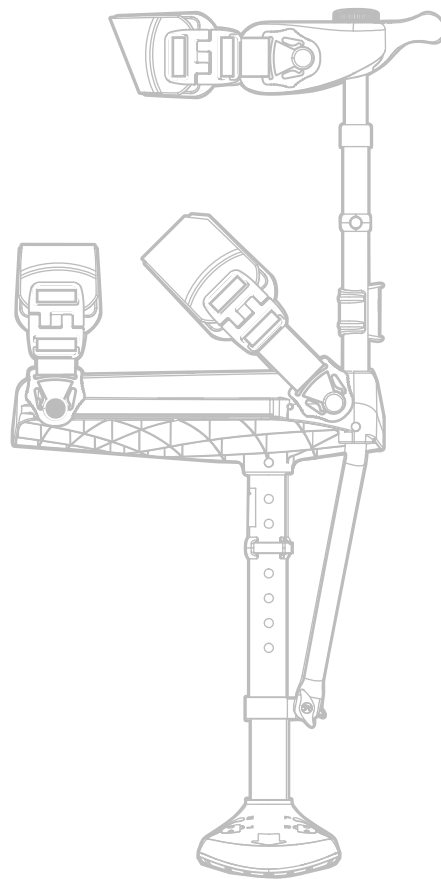

Посетите наш сайт для ознакомления с видео инструкциями

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ: НАУЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ iWALK - 3 ПРОСТЫХ ЭТАПА

[www.iwalk-free.com/get-started](http://www.iwalk-free.com/get-started)



1 Assemble  
Your iWALK3.0




2 Fitting  
Your iWALK3.0



3 Taking Your  
First Steps



1 **СБОРКА**  
Сборка iWALK3.0 - проста,  
быстро и без инструмента

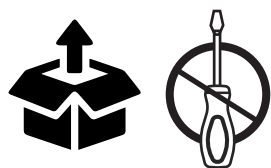

2 **ПРИМЕРКА**  
**ОТРЕГУЛИРОВАТЬ iWALK ПО ВАШЕЙ НОГЕ**  
ГЛАВНОЕ = ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ! Это просто, если вы будете  
следовать нашим видео инструкциям. Отрегулируйте iWALK так,  
чтобы он идеально вам подходил.



3 **ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ  
НА iWALK**  
Наши видео инструкции показывают вам,  
как правильно стоять, ходить, подниматься и  
спускаться по лестнице, одевать и снимать iWALK.



**НУЖНА ПОМОЩЬ?  
НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫ?**



Недостающие  
детали?



Сложности в  
сборке?



Проблемы с  
регулированием?

**Перед возвратом**

**Обратитесь в наш Отдел поддержки:**



**+1 562-653-4222**

С Понедельника по Пятницу с 8:00 до 16:00 PST

[support@iwalk-free.com](mailto:support@iwalk-free.com)

Или посетите нашу страницу поддержки:


[Перейти на страницу Поддержки](#)



Для связи с местным представителем  
<https://iwalk-free.com/international-dealers/>



Воспользуйтесь данной диаграммой во время вашего звонка в техподдержку iWAKFree

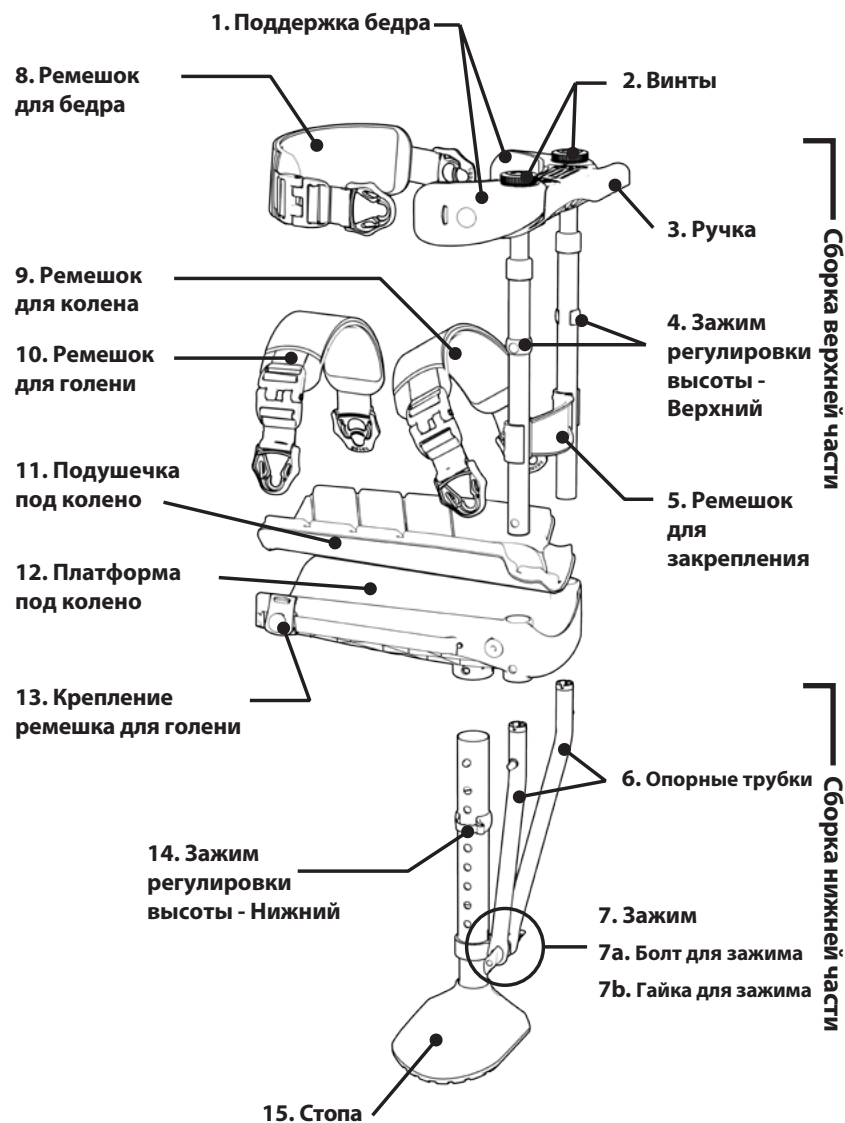

## Нормативная информация о соответствии

- Указание к использованию: Это устройство предназначено для индивидуального использования пациентами с весом до 126 кг, нуждающимся разгрузить одну ногу во время ходьбы, без одновременного использования других вспомогательных устройств (трость или костыль), в помещении и на улице при температуре от 0 °C до +40 °C.
- Запланированный срок службы продукта: 150 дней из расчета - 6000 шагов в день для самого активного пациента; и больше, для менее активных пациентов.
- Инструкции по очистке: промойте чистой водой, затем дайте высохнуть, убедившись, что не остается жидкости.

- ⚠ Устройство не предназначено для использования без присмотра, пациентами со значительными нарушениями равновесия или когнитивными нарушениями.
- ⚠ Пользователи с когнитивными нарушениями должны обратиться за помощью к лицу, обученному использованию устройства.
- ⚠ Используйте устройство только после правильной сборки, согласно инструкций квалифицированного персонала.
- ⚠ Если вы не понимаете эти инструкции, остановитесь и обратитесь за квалифицированной помощью.
- ⚠ Устройство предназначено для использования только одним пользователем, а не для аренды или перепродажи.
- ⚠ Воспламеняемость: это устройство не содержит огнестойких материалов.
- ⚠ Не подвергайте воздействию внешних источников тепла или открытого огня. Не храните и не оставляйте под прямыми солнечными лучами и не используйте, когда устройство болезненно горячо на ощупь, пока оно не остынет.
- ⚠ Держите пальцы вдали от маленьких или V-образных отверстий во время использования устройства или в состоянии покоя.
- ⚠ Не глотать компоненты устройства. Не собирать и не разбирать устройство в присутствии маленьких детей.
- ⚠ Прекратите использование устройства, если есть какие-либо повреждения мягких тканей, связанные с его использованием или ношением.
- ⚠ Устройство не отвечает на словесные или телепатические команды.
- ⚠ В устройстве нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. При замене деталей следуйте оригинальным инструкциям по сборке.
- ⚠ Устройство содержит металлические детали. НЕ НОСИТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ во время медицинских исследований любого типа, включая МРТ.

